


哺乳期の子豚に、
注射しないで
自由に投薬。

子豚の健全育成

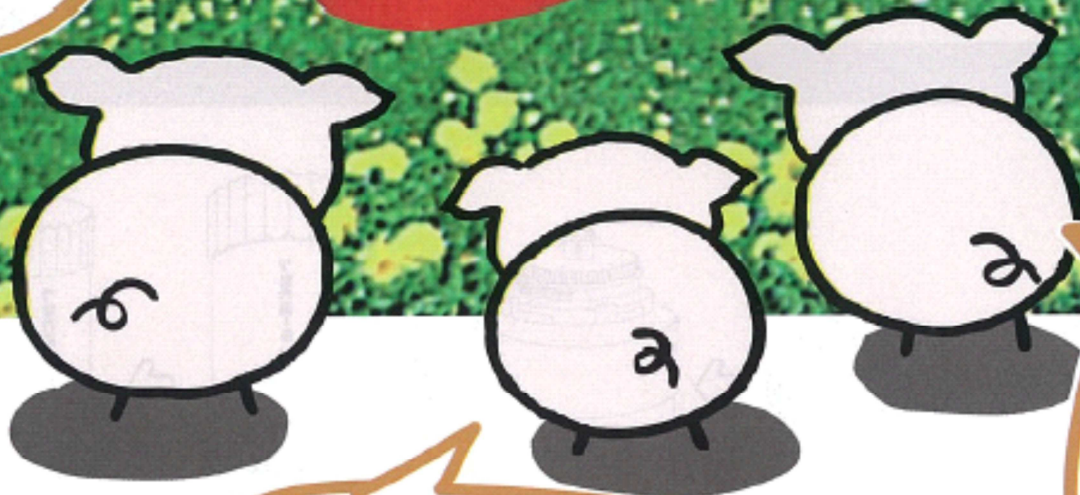

予防衛生

投薬の省力化

クミカボール7

哺乳豚用自動投薬器 (4ℓ入)

自然に学び 自然を守る



クミカ

クミカボール7 の 使い方

登録意匠第408899号

用途

投薬、給水のほか、代用乳や人工乳等の餌付けにも用いられる。

特徴


1. 新鮮な薬液や飲水を衛生的に自由に与えられる。
2. 簡単に、誰にもどこでも取り付けられる。
3. 薬液、飲水、液状人工乳投与等、利用範囲が広い。

上手な 使い方

クミカボール7 は、豚房の角等、隅に置くと飲みつきが悪いので、保温箱の出入口付近に置く事が、哺乳豚に薬液を早く飲みつかせるコツです。

荷姿 6ケ入/1ダンボール

使用の手順

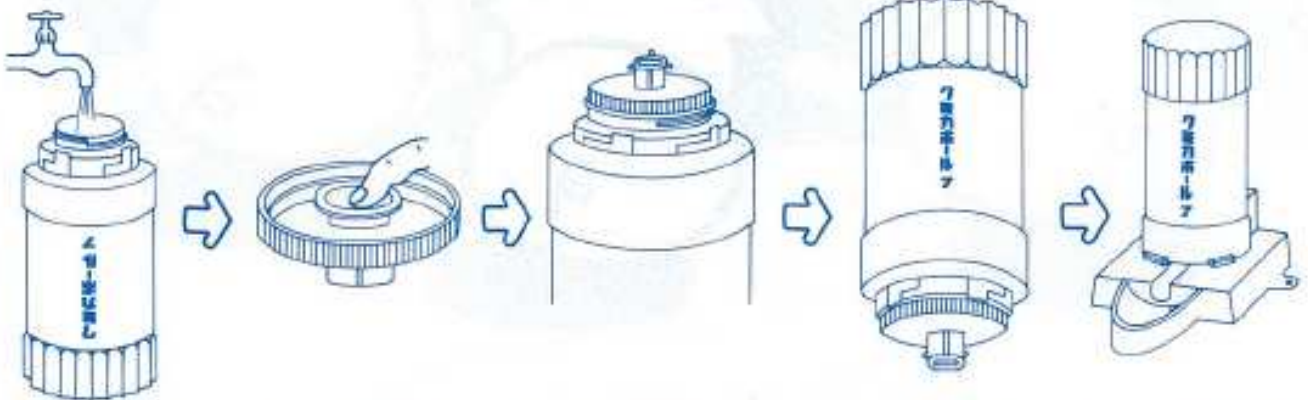

ポリタンクに水を入れる

キャップの内側から
中栓を押しだす

ポリタンクにキャップ
を取りつける

逆さにする

ポリタンクを受け台に
はめこむ

ボトルのみの交換にはクミカボールボトルをご利用下さい。荷姿 12ケ入/1ダンボール